


Onderhoud van instrumenten

- ! - In geopende toestand reinigen!
- Naspoelen met gedemineraliseerd water!
- ! - Voldoende laten drogen!

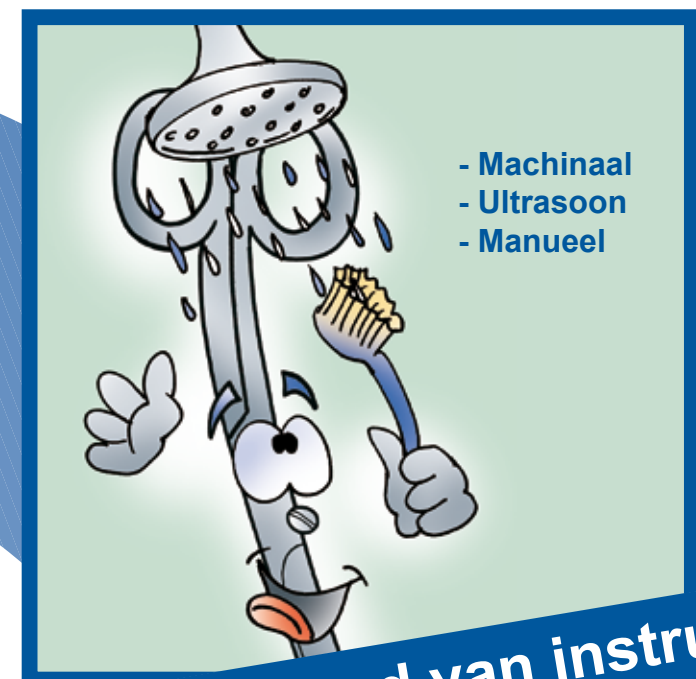

Onderhoud van instrumenten

Visuele- en functionele controle



Defecte instrumenten!



Nieuwe instrumenten



Operatie Kamer

Lawton's
**Lucky
Lawrence**

Stoom sterilisatie



- ! - Alleen gedemineraliseerd water gebruiken!
- $\geq 134^{\circ} \text{C}$!
- Neem de normen in acht!

Sorteren en verpakken



- ! - Instrumenten met cremallere openen!
- Instrumentennet niet overbeladen!

Besteld u alstublieft onze „onderhoud van instrumenten- beknopte informatie“ gratis!

www.lawton.de