



Instrumentos nuevos

## Tratamiento de instrumentos

- ! - Limpiar los instrumentos en estado abierto!
- Enjuagar con agua desmineralizada!
- ! - Secar suficiente!



- ! - Uso prevenido!
- Conducir los instrumentos a la evacuación seca y húmeda!


Quirófano



- mecánico
- ultrasonido
- manual

Limpieza del instrumental

Examen visual y función

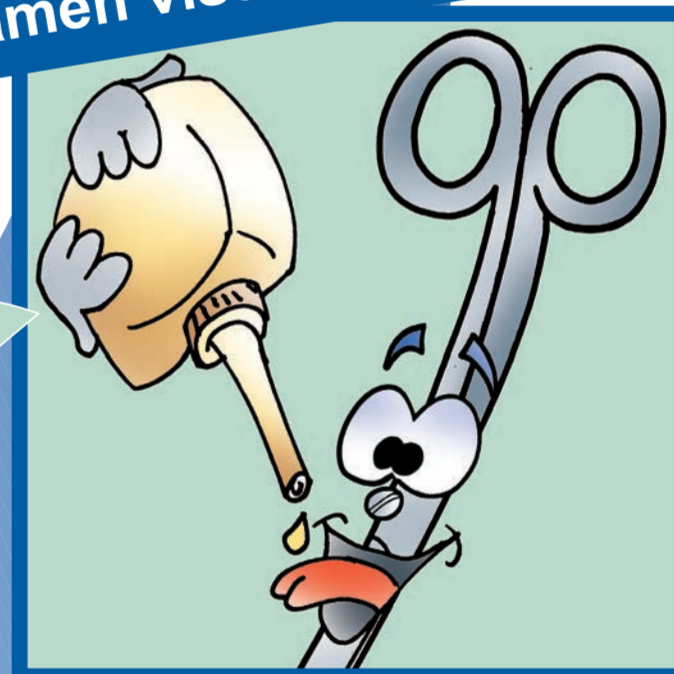

- ! Instrumentos especiales tienen que ser manejados por separado!

- ! Lubricar las articulaciones/ superficies de fricción!

Instrumentos defectos!



Lawton's  
**Lucky  
Lawrence**

Esterilización al vapor



- ! - Utilizar solamente agua desmineralizada!
- $\geq 134^{\circ} \text{C}$
- Observar las normas!

Seleccionar y embalar



- ! - Abrir los instrumentos con cremallera!
- No sobrecargar las bandejas!

Pedir nuestras sugerencias gratuitas „Tratamiento de instrumentos - Informaciones breves“

[www.lawton.de](http://www.lawton.de)