

# LAWTON

MEDIZINTECHNIK



Новые инструменты!

## Чистка

## инструментов!

- ! - Чистить в открытом состоянии!
- Полоскать в дистиллированной воде!
- - хорошо просушить!



- ! - Применять по назначению!
- Чистку инструментов проводить в сухом или влажном виде!

Операционный зал!



- аппаратная
- ультразвуковая
- ручная


Чистка инструментов!



Lawton's  
**Lucky  
Lawrence**

- ! Специальные инструменты подлежат особой обработке!

Визуальный и функциональный контроль

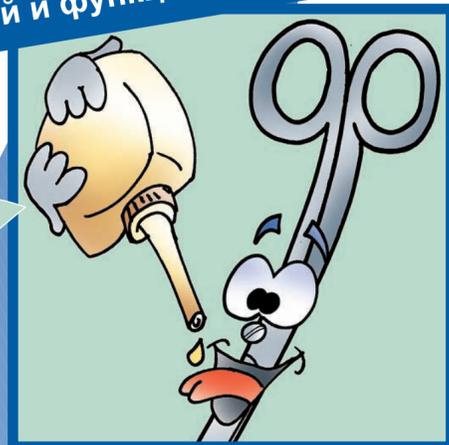

- ! Сгибы и соприкасающиеся поверхности смазывать!

Неисправные инструменты!



Сортировать и упаковывать!



- ! - Открыть зажимы на инструментах!
- Не перегружать сетки!

Стерилизация паром!



- ! - Применять только в дистиллированной воде!
- $\geq 134^\circ \text{C}$ !
- придерживайтесь норм!

Спрашивайте нашу бесплатную брошюру – краткую информацию о подготовке инструментов

[www.lawton.de](http://www.lawton.de)

Ваш изготовитель - поставщик

LAWTON GmbH & Co. KG  
Württembergischer Straße 23  
78567 Fridingen/Germany  
Tel. +49 (0) 7463 9965-0

