



Neue  
Instrumente


## Instrumenten- aufbereitung

- ! - In geöffnetem Zustand reinigen!
- Mit vollentsalztem Wasser nachspülen!
- - Ausreichend trocknen!



- ! Bestimmungsgemäßer Gebrauch!  
Instrumente der Trocken- oder  
■ Nassentsorgung zuführen!

Operationsaal

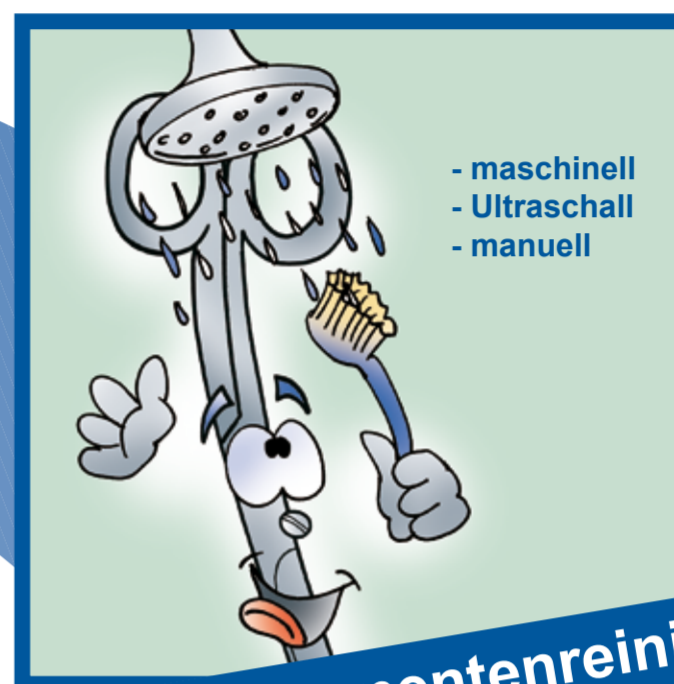

- maschinell
- Ultraschall
- manuell

Instrumentenreinigung



Lawton's  
**Lucky  
Lawrence**

Sicht- u. Funktionsprüfung

- ! Spezielle Instrumente  
sind gesondert  
zu behandeln!



- ! Gelenke/  
Reibungs-  
■ flächen ölen!

Defekte  
Instrumente



Dampfsterilisation



- ! - Nur vollentsalztes  
Wasser verwenden!
- $\geq 134^{\circ}\text{C}$ !
- - Normen beachten!

Sortieren und verpacken



- ! - Instrumente mit Sperre öffnen!
- - Siebe nicht überladen!

Fordern Sie unsere  
kostenlosen Tipps  
„Instrumentenaufbereitung -  
Kurzinformationen“ an!

[www.lawton.de](http://www.lawton.de)