



Nové nástroje

## Údržba nástrojů

- ! - Nástroje čistíte otevřené!
- Opláchněte demineralizovanou vodou!
- - Ujistěte se o dostatečném času sušení!



! Nástroje připravené k použití na operačním sále a v ambulantním provozu.

Operační sál



- automatické  
- ultrazvukové  
- manuální

čistění nástrojů

Parní sterilizace




! Použijte pouze demineralizovanou vodu!  
-  $\geq 134^{\circ}\text{C}$ !  
■ - Dodržujte normy!

Lawton's  
**Lucky  
Lawrence**


Vizuální a funkční kontrola

! Ošetřujte speciální nástroje odděleně!

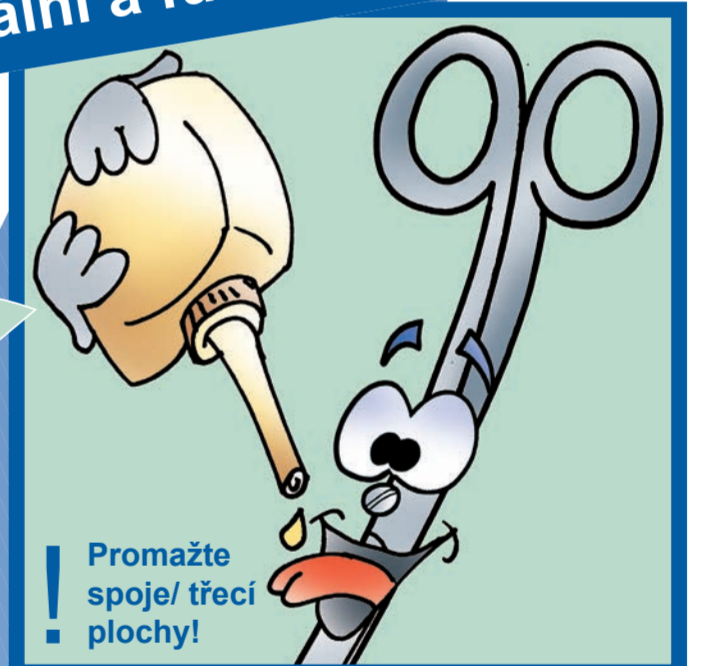

! Promažte spoje/ třecí plochy!

Uspořádání a naplnění

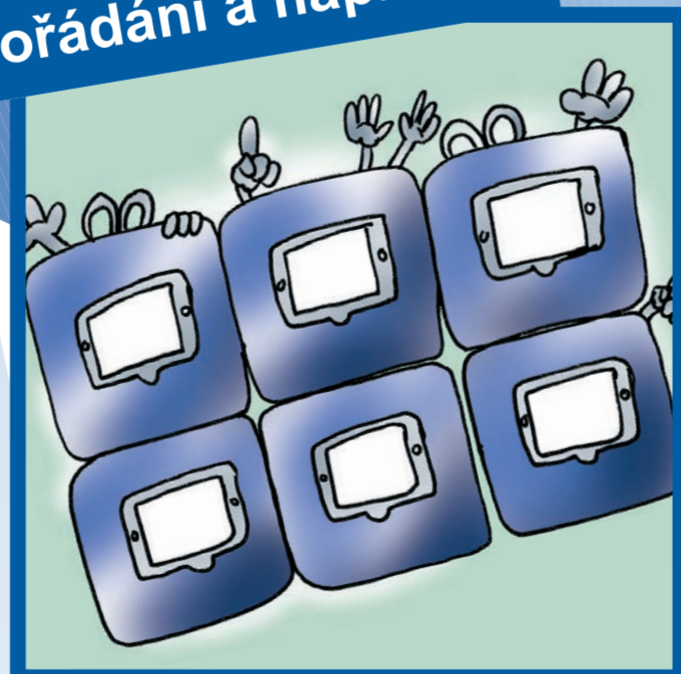

! - U nástrojů otevřete zámky!  
■ - Nepřepínejte síta!

Prosím, objednejte zdarma „Základní informace o údržbě nástrojů“

[www.lawton.de](http://www.lawton.de)

Vadné nástroje

