

# LAWTON

MEDIZINTECHNIK



Novos Instrumentos


## Manutenção dos instrumentos

- ! - Mantenha abertos os instrumentos para a limpeza
- Enxague com água desmineralizada
- Secar o suficiente



- ! - Indicação de uso
- Aplique aos instrumentos manuseio seco ou úmido


Sala de Cirurgia

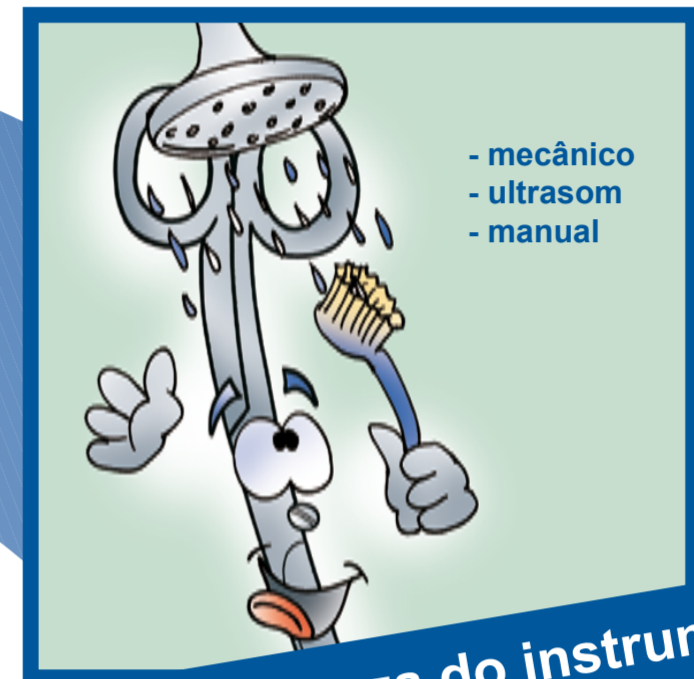

- mecânico
- ultrassom
- manual

Limpeza do instrumento

Conferência visual e teste de funcionamento

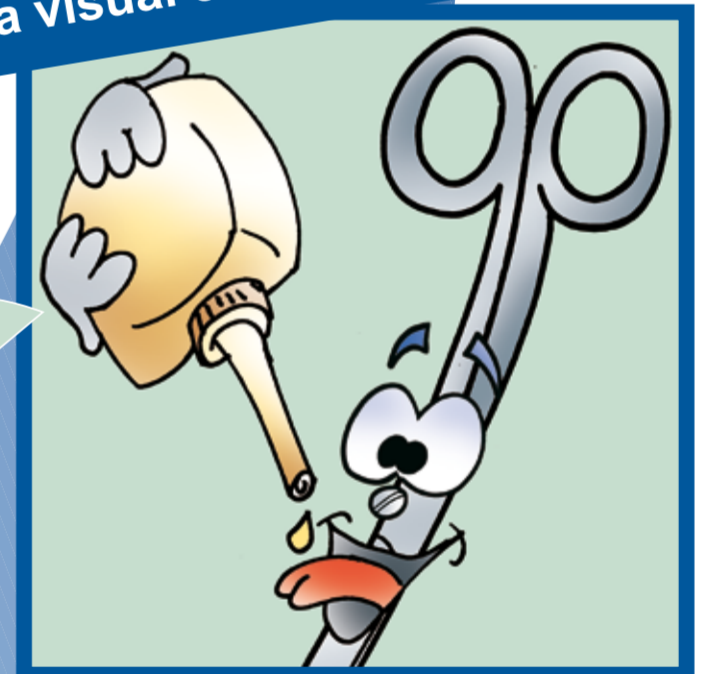

- ! Manuseie os instrumentos especiais separadamente

- ! Lubrifique as articulações / superfícies de fricção

Instrumentos defeituosos



Lawton's  
**Lucky  
Lawrence**

Selecionar e empacotar



- ! - Abrir todos os instrumentos com cremalheira
- Não sobrecarregar as bandejas

Esterilização a vapor



- ! - Use somente água desmineralizada
- $\geq 134^{\circ} \text{C}$
- Respeite as Normas

Por favor peça gratuitamente  
nosso „Tratamento de  
Instrumentos -  
Informações Rápidas

[www.lawton.de](http://www.lawton.de)

Seu Fabricante

LAWTON GmbH & Co. KG  
Württembergische Straße 23  
78567 Fridingen/Germany  
Tel. +49 (0) 7463 9965-0

